

Глутенова непоносимост

Бърз тест за откриване на целиакия

10 мин.



Точност
98 %



Болезненият въпрос за стомаха и червата: протеинът глутен

Често възникващи неясни стомашно-чревни оплаквания - като подуване на корема или диария - могат да бъдат причинени от непоносимост към глутен, протеиново вещество, съдържащо се в много храни. Други признаци на непоносимост към глутен, наричана също целиакия, могат да бъдат загуба на тегло, белези на дефицит или кожни заболявания.

Разберете своето състояние: бърз тест за глутенова непоносимост

С бързия тест за глутенова непоносимост на Veroval® можете бързо и сигурно да определите дали вашите симптоми са причинени от непоносимост към глутен. Ако това е така, можете да обсъдите с Вашия лекар как да поцедирате или да приложите диета без съдържание на глутен.

Колко надежден е тестът Veroval®?

Бързият тест за глутенова непоносимост е разработен с цел прилагането на точността и сигурността на съвременната диагностика и за лична употреба в домашни условия. Той се основава върху откриването на антитела срещу трансглутаминаза (антитела IgA), които указват за глутенова непоносимост. Този тест е подходящ както за първоначална диагноза, така и за проследяващ контрол на терапия. Това е така, защото антителата a-tTG-IgA намаляват в рамките на няколко седмици при провеждане на безглутенова диета и след около 6 месеца повече не могат да бъдат открити. **Точността на теста, доказана чрез проучвания за оценка на ефективността, е над 98 %.**

Сложно ли е провеждането на теста?

Не: всичко, от което се нуждаете, са добре измити ръце, часовник и маса с равна повърхност. Точното протичане на теста е описано на задната страница. Необходимо е да прочетете изцяло ръководството за употреба, за да узнаете как се определя и тълкува резултатът. Трябва да се запознаете с всички подробности, преди да проведете теста.

Важна информация:

Положителните тестови резултати могат да имат много безобидни причини – отрицателните не винаги означават, че не е налице проблем. Окончателната диагноза трябва да бъде поставена от лекар.

* Невярно отрицателен = невярно оказан отрицателен тестов резултат, въпреки че резултатът в действителност е положителен.

www.veroval.bg

Материали

- 1 касета за тест в торбичка от фолио
- 1 пилета
- 1 съд с разреждател за проба
- 2 автоматични средства за пробждане (1 резервно) със стерилни ланцети за вземане на кръвна проба



STERILE R CE 0120

- 1 стъклена капиллярна тръбичка в предпазна опаковка
- 1 тампон с алкохол



- 1 пластир



- 1 ръководство за употреба

Обяснение на символите

Спазвайте ръководството за употреба	Инвитро диагностика (Приложение извън тялото)	Годен до (вижте отпечатаното върху опаковката)
Съхранявайте на сухо място при 10 °C – 27 °C. Не замразявайте.	Съдържание достатъчно за 1 тест	Не използвайте повторно
Производител	Стерилизиране чрез облъчване	Код на партидата (вижте отпечатаното върху опаковката)
10 мин. Време за реакция в касетата за тест	Бърз тест за самостоятелно приложение	

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg



Представител:
BG – PAUL HARTMANN Sofia 1113,
25A Major Yuri Gagarin Str., fl. 1
Tel.: 02/ 964 18 20

Ръководство за употреба на български
Ревизирано издание от ноември 2015 г. (Rev. 00)

Глутенова непоносимост

Бърз тест за самостоятелно приложение

Начин на провеждане:

- 1** • Поставете компонентите на теста върху масата. Не отваряйте още опаковката от фолио.



- (1) Съд с разредител за проба
- (2) Тампон с алкохол
- (3) Автоматични средства за прободжане
- (4) Стъклена капилярна тръбичка в предпазна опаковка
- (5) Касета за тест в торбичка от фолио
- (6) Пипета
- (7) Пластир

Подготовка


- Преди да започнете теста, касетата за тест и разредителя за проба трябва да достигнат стайна температура (15 °C до 27 °C). Отворете съда с разредителя за проба, като отстраните капачката и го поставете изправен на масата.




- Завъртете сивата капачка на автоматичното средство за прободжане (3), докато тя се освободи. След това направете още 2 оборота.
- Масажирайте върха на показалеца и го почистете с тампон с алкохол (2). Оставете пръста да изсъхне.
- Притиснете средството за прободжане с кръглия отвор срещу страничната част на почистения връх на пръста (а) и натиснете механизма (б).



- Отворете предпазната опаковка (4) и извадете внимателно стъклената капилярна тръбичка.
- Изстискайте капка кръв от върха на пръста.
- Задръжте стъклената капилярна тръбичка хоризонтално в капката кръв, докато тя се напълни изцяло.
- Използвайте приложения пластир (7), ако е необходимо.

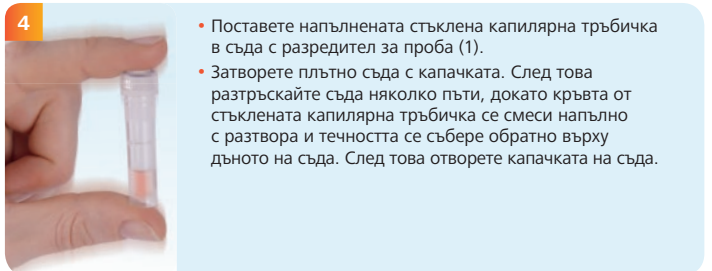

- Поставете напълнената стъклена капилярна тръбичка в съда с разредител за проба (1).
- Затворете плътно съда с капачката. След това разтръскайте съда няколко пъти, докато кръвта от стъклената капилярна тръбичка се смеси напълно с разтвора и течността се събере обратно върху дъното на съда. След това отворете капачката на съда.

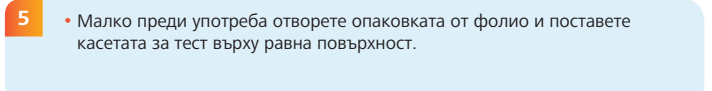


- Малко преди употреба отворете опаковката от фолио и поставете касетата за тест върху равна повърхност.



- С пипетата (6) вземете няколко капки от разредената проба.
- С пълната пипета (6) поставете 5 капки отгоре в кръглото поле за приложение (S) на касетата за тест (5). **Моля, внимавайте да не поставите течност върху прозореца за резултата (T) или (C).** След като поставите капките, не докосвайте и не местете повече касетата за тест.
- След добавяне на 5 капки отчетете резултата след точно 10 минути.

За оценка на резултата определете първо дали в тестовия прозорец под (C) се вижда една линия. Няма значение колко силно или слабо е изразена контролната линия.


Положителен резултат

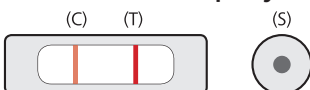

Резултатът от теста е **положителен**, когато се появи една светло- до тъмночервена **линия в контролното поле (C)** и **може да се разпознае една светло- или тъмночервена линия в тестовото поле (T)**.

Тестът показва, че във Вашата кръв се откриват антитела IgA, които възникват във връзка с глутенова непоносимост. Откриването на тези антитела означава с висока вероятност, че е налице глутенова непоносимост. За да получите еднозначна диагноза, посетете своя лекар.


Отрицателен резултат

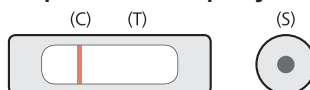

Резултатът от теста е **отрицателен**, когато се появи една светло- до тъмночервена **линия в контролното поле (C)** и **не може да се разпознае червена линия в тестовото поле (T)**.

Тестът показва, че във Вашата кръв не се откриват антитела IgA, които указват глутенова непоносимост. Може да бъде почти изключено съществуването на глутенова непоносимост. Ако стомашно-чревните проблеми или другите симптоми продължат, е необходимо допълнително да се консултирате с Вашия лекар.

Невалиден резултат

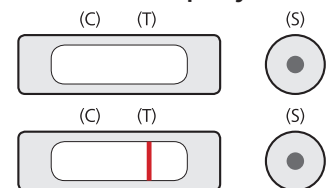

Ако не виждате **контролна линия (C)** или **виждате само една тестова линия (T)**, тестът е неправилно проведен и невалиден.

Проверете дали всички точки от ръководството за употреба са изпълнени точно. Проведете нов тест с нова кръвна проба.